



BANO **STØTTESYSTEM** FDV-DOKUMENTASJON

DESIGNED **FOR CARE**

DESIGNED FOR CARE

Produkter

5700 Dusjsete med høydejustering

5710 Armlen

5701 Dusjsete uten høydejustering

5600/R Støttehåndtak Wc 90cm med høydejustering

5600/L Støttehåndtak Wc 90cm med høydejustering

5607/R Støttehåndtak WC 70cm med høydejustering

5607/L Støttehåndtak WC 70cm med høydejustering

5601 Støttehåndtak WC 90cm u/høydejustering

5608 Støttehåndtak WC 70cm u/høydejustering

Materialspesifikasjon

- Dusjsete, armlene, WC-støttehendel: integralskum med polyuretanlakk
- Festeskinner: natureloksert aluminiumslegering
- Plasttopper: sprøytestøpt polypropylen

Vedlikeholdsanvisning

Med tanke på rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Skure-pulver og stålull skal ikke brukes da det ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK.

Advarsel

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit og lynol skal ikke brukes.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

5700



5701



5600



5601



DESIGNED FOR CARE

Produkter

- 5581/R** Dusjstang, høyre hvit
- 5581/R-G** Dusjstang, høyre Grå
- 5581/R-B** Dusjstang, høyre sort metallic
- 5581/L** Dusjstang, venstre hvit
- 5581/L-G** Dusjstang, venstre Grå
- 5581/L-B** Dusjstang, venstre sort metallic
- 5591/R** Støttehåndtak, høyre hvit
- 5591/R-G** Støttehåndtak, høyre Grå
- 5591/R-B** Støttehåndtak, høyre sort metallic
- 5591/L** Støttehåndtak, venstre hvit
- 5591/L-G** Støttehåndtak, venstre Grå
- 5591/L-B** Støttehåndtak, venstre sort metallic

- 5440** Støttehåndtak, 40 cm, hvit
- 5440-G** Støttehåndtak, 40 cm grå
- 5440-B** Støttehåndtak, 40 cm sort metallic
- 5460** Støttehåndtak, 60 cm, hvit
- 5460-G** Støttehåndtak, 60 cm grå
- 5460-B** Støttehåndtak, 60 cm sort metallic
- 5480** Støttehåndtak, 80 cm, hvit
- 5480-G** Støttehåndtak, 80 cm grå
- 5480-B** Støttehåndtak, 80 cm sort metallic
- 54100** Støttehåndtak, 100 cm, hvit
- 54100-G** Støttehåndtak, 100 cm grå
- 54100-B** Støttehåndtak, 100 cm sort metallic

Materialspesifikasjon

- Støttehåndtak, dusjstang/støttehåndtak:
pulverlakkert aluminium
- Innfesting: syrefaste skruer A4

Vedlikeholdsanvisning

Med tanke på rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Skure-pulver og stålull skal ikke brukes da det ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK.

Advarsel

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit og lynol skal ikke brukes.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

5581/R



5591/L

5591/R



5440



5460



5480



54100



DESIGNED FOR CARE

Produkter

- 5596** Dusjhylle
- 5400** Hengekroker
- 5497** Avfallsbøtte
- 5510** Stokkholder
- 5489** Wc-børste multifunksjon

Materialspesifikasjon

- Dusjhylle: Nylon
- Hengekrok: Støpt i massiv nylon.
- Avfallsbøtte: ABS-plast.
- WC børste: Støpt i polypropylenplast med beholder i ABS-plst. Feste i vegg: antibakteriell pulverlakkert aluminium, nylon og syrefaste skruer.
- Stokkholder: ABS-plast og gummi.

Vedlikeholdsanvisning

Ved rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt rengjøringsmiddel. Dusj på objektet og tørk av med en fuktig klut. Skurepulver og stålull skal ikke brukes da det ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes av helsevesen er OK.

Advarsel

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-sprit og lynol skal ikke brukes.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

5596



5400



5497



5510



5489

